

MAGNESIUM^{Mg} WHEELS



GEBRAUCHSANWEISUNG

MAGNESIUM WHEELS

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Rollstuhlräder!

Wir möchten gerne alle aktiven Rollstuhlfahrer den Komfort von leichten Magnesium Wheels erleben lassen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung zunächst aufmerksam durch. Hierin finden Sie alle notwendigen Informationen über die Benutzung und Pflege Ihrer Magnesium Wheels. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Ihren Magnesium-Wheels-Händler wenden.

Das Online-Manual finden Sie auf:
www.magnesium-wheels.com/manual

Inhalt		S.
1.	Vorwort.....	3
2.	Sicherheit.....	4
3.	Lieferung, Transport und Lagerung.....	5
4.	Modelle und Maße.....	5
5.	Montage, Wartung und Schäden.....	6
6.	Verkauf oder Entsorgung.....	8

Magnesium Wheels by MIFA
Gebrauchsanweisung, Erste Ausgabe, Januar 2017
Originalausgabe auf Niederländisch
Übersetzt von: n. z.
Mifa Aluminium B.V.
Rijnaakade 6
5928 PT, Venlo, Niederlande
info@mifa.eu, +31 77 389 8888
<http://www.mifa.eu>

MAGNESIUM^{Mg} WHEELS



1. Vorwort

Diese Gebrauchsanweisung bezieht sich auf alle Typen von Magnesium Wheels.

EINSATZBEREICH

Die Magnesium Wheels sind für die tägliche Benutzung und für verschiedene Sportarten geeignet. Wir raten jedoch von allen Kontaktsportarten ab. Die Räder sind auf ein Höchstgewicht von 120 kg (Benutzer einschließlich Gepäck) ausgelegt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Magnesium Wheels sind Rollstuhlräder für Alltags- und Sportrollstühle. Beim Einsatz an Sportrollstühlen sind die Räder vor und nach jedem Gebrauch zu kontrollieren und nach dem Gebrauch zu reinigen. Werden bei der Benutzung oder Pflege Mängel festgestellt, sollte sofort Kontakt mit dem Magnesium-Wheels-Händler aufgenommen werden. Magnesium Wheels haftet nicht für Schäden bzw. Verletzungen durch die Benutzung von Magnesium-Wheels-Rollstuhlrädern bei Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, mangelhafter Pflege, Verwendung der Räder für andere als die vorgesehenen Zwecke oder Nichtbefolgung dieser Gebrauchsanweisung und etwaiger weiterer von Magnesium Wheels bereitgestellter Informationen.

GARANTIE

Auf Ihre Magnesium Wheels gelten zwei Jahre Garantie, sofern die vorgeschriebene Verwendung und Pflege eingehalten wird. Bitte wenden Sie sich bei Mängeln am Produkt immer sofort an Ihren Magnesium-Wheels-Händler. Bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung erlischt der Garantieanspruch.

MAGNESIUM^{Mg} WHEELS



2. Sicherheit

PRÜFUNG VOR UND NACH GEBRAUCH

Prüfen Sie bei der Verwendung im Rollstuhlsport Ihre Räder vor und nach jedem Gebrauch. Nach dem Gebrauch sind die Räder zu reinigen. Kontrollieren Sie das Rad beidseitig auf Beschädigungen, lockere oder gebrochene/verbogene Speichen und auf Spiel in den Radlagern. Bei der Verwendung an Alltagsrollstühlen hat die Prüfung und Reinigung regelmäßig zu erfolgen, je nach Nutzungsintensität und Verschmutzungsgrad.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihre Magnesium Wheels mit einem weichen, fusselfreien Tuch und einer milden (vorzugsweise biologisch abbaubaren) Seife. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in die Radlager.

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Antirutschbeschichtung

Der optionale Greifreifen ist mit einer speziellen, verschleißfesten Antirutschbeschichtung versehen. Diese Beschichtung verhindert das Abrutschen auf dem Greifreifen, auch bei schwitzigen Händen.

Speichenschützer

Wenn eine erhöhte Gefahr des Einklemmens von Gliedmaßen oder Gegenständen zwischen den Speichen besteht, ist die Verwendung von Speichenschützern erforderlich. Diese werden nicht standardmäßig mitgeliefert. Bitte nehmen Sie für mehr Informationen Kontakt mit Ihrem Magnesium-Wheels-Händler auf.

MAGNESIUM^{Mg} WHEELS



3. Lieferung, Transport und Lagerung

INHALT DER VERPACKUNG

2 präzise montierte Magnesium Wheels. 1 Satz mit 6 Schrauben und Muttern, vorgesehen zur Montage eines Greifreifens (optional). Die Verwendung anderer als der zu den Magnesium Wheels mitgelieferten Schrauben ist ausdrücklich verboten.

TRANSPORT

Wenn die Räder transportiert werden, dürfen diese keinen seitlichen Belastungen oder der Gefahr von Kratzern und anderen Beschädigungen ausgesetzt sein. Die Räder müssen fachgerecht am Rollstuhl montiert oder in Radtaschen verpackt sein. Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Reifen jederzeit aufgezogen sein (siehe Vorschriften in der Gebrauchsanweisung).

LAGERUNG

Die Räder sind fachgerecht am Rollstuhl montiert, in einer Radtasche oder in der Originalverpackung aufzubewahren. Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Reifen jederzeit aufgezogen sein (siehe Vorschriften in der Gebrauchsanweisung).



4. Modelle und Maße

Die Magnesium Wheels sind in folgenden Maßen erhältlich:

- 24 inch ETRTO: 540 (24 Speichen, 120 Kg Tragfähigkeit)
- 25 inch ETRTO: 559 (24 Speichen, 120 Kg Tragfähigkeit)
- 26 inch ETRTO: 590 (24 Speichen, 120 Kg Tragfähigkeit)
- 27 inch ETRTO: 622 (24 Speichen, 120 Kg Tragfähigkeit)

MAGNESIUM^{Mg} WHEELS



5. Montage, Wartung und Schäden

MONTAGE DER RÄDER

Ihr Händler montiert Ihnen die Räder und gibt Ihnen wenn nötig Anweisungen zur Montage.

AUFZIEHEN DER REIFEN

Bringen Sie das Felgenband und die Reifen gemäß den Anweisungen des Herstellers an. Achtung! Die Verwendung anderer Werkzeuge als der unten abgebildeten Reifenheber ist ausdrücklich verboten!



Aufziehen von „Marathon Plus“-Reifen der Marke Schwalbe: Die „Marathon Plus“-Reifen von Schwalbe lassen sich sehr schwer anbringen. Bitte befolgen Sie dazu die Anleitung von Schwalbe. <https://www.schwalbe.com/en/montage.html>



MONTAGE DES GREIFREIFENS

Für die Montage des Greifreifens sind die zu den Magnesium Wheels mitgelieferten Schrauben zu verwenden. Beim jedem Austausch des Greifreifens müssen auch die Schrauben und Muttern ersetzt werden. Die Verwendung anderer als der zu den Magnesium Wheels mitgelieferten Schrauben ist ausdrücklich verboten! Die Schrauben sind mit maximal 5 Nm wie nachfolgend beschrieben anzuziehen.

MAGNESIUM WHEELS

Mg



Schritt 1:
Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel in die Schraube.



Schritt 2:
Legen Sie den Maulschlüssel an die Mutter an.



Schritt 3:
Ziehen Sie die Mutter mit dem Maulschlüssel fest.

Schritt 4:
Ersetzen Sie den Maulschlüssel durch einen Drehmomentschlüssel, sobald der erste geringe Widerstand zu spüren ist. Ziehen Sie anschließend die Mutter auf 5 Nm an. Achtung! Der Innensechskantschlüssel dient nur zum Gegenhalten der Schraube. Es ist verboten, die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel anzuziehen.

WARTUNG

Die Magnesium Wheels sind bis auf die Kontrolle und Reinigung wartungsfrei. Bei spürbarem Spiel der Radlager, bei knirschenden Geräuschen während der Benutzung oder wenn sich das Rad nicht mehr reibungslos dreht, sind die Hochleistungsradlager durch Ihren Händler zu ersetzen.

REPARATUR

Falls eine Reparatur an den Magnesium Wheels erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Magnesium-Wheels-Händler.

ERSATZTEILE

Es ist ausdrücklich verboten, andere als die Originalteile bzw. die von Ihrem Magnesium Wheels-Händler empfohlenen Teile zu verwenden, da dies zu gefährlichen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Materialien führen kann.

SCHÄDEN

Wenden Sie sich bei Beschädigungen oder Reklamationen bitte sofort an Ihren Magnesium-Wheels-Händler.

MAGNESIUM ^{Mg} WHEELS

GEEIGNETE INNENSCHÄUKE

540 - Schwalbe Presta (French) 40mm SV9A
559 - Schwalbe Presta (French) 40mm SV11A
590 - Schwalbe Presta (French) 40mm SV12B
622 - Schwalbe Presta (French) 40mm SV20

Verfügbar beim Amazon/Ebay oder fragen Sie Ihre Lokale Fahrradhändler.



6. Verkauf oder Entsorgung

VERKAUF

Wenn Sie Ihren Rädersatz verkaufen, sind Sie verpflichtet, dem Nachbesitzer diese Gebrauchsanweisung zu übergeben und ihm die Kontaktangaben Ihres Händlers mitzuteilen.

ENTSORGUNG

Wenn Sie Ihre Räder außer Betrieb nehmen, sind diese nach den vor Ort geltenden Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.